

## Zementieren von VMK-Zirkonoxid-Kronen



1 Reinigung der Zahnfläche (Bimsstein und Chlorhexidindigluconat).



2. Einprobe, danach Reinigung mit Phosphorsäure-Gel, gründlich spülen und trocknen.



3. Einprobe und anschließende Reinigung der Innenfläche mit Phosphorsäure-Gel, danach gründlich spülen.



4. Applikation von BisCem auf die Kroneninnenfläche, in situ bringen, gut andrücken und Zement- überschuss entfernen.



5. Lichthärtung (20 Sek.) oder Selbsthärtung abwarten.

## Bestellinformationen

### BisCem

BID-45011P

BisCem Dual-Syringe  
Translucent, 8 g

BID-45012P

BisCem Dual-Syringe  
Opaque, 8 g



**ms·dental**<sup>®</sup>

MS Dental AG

Dentalprodukte · Produits dentaires

Juraweg 5 · CH-3292 Busswil

T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78

info@msdental.ch · www.msdental.ch