

ENA WHITE 2.0 EMPFOHLENE ANWENDUNGSSCHRITTE



1 Entfernen der Kappe von der Zahnbürste.



2 Zahnbürste durch Drehen vom Dispenser entfernen.



3 Versiegelung mit einer Pinzette entfernen.



4 Zahnbürste wieder auf den Dispenser schrauben.



5 Silbernen Ring in Richtung «Up» drehen, bis blaues Gel in der Mitte des Bürstenfeldes austritt, etwa erbsengross.



6 Die zu bleichenden Zähne 30 Sek. lang einbürsten, dabei Zahnfleischkontakt nach Möglichkeit vermeiden.



7 Zahnbürste unter fließendem Wasser reinigen.



8 Zähne nochmals 30 Sek. bürsten und danach den Mund gründlich mit Wasser spülen (sowie auch die Zahnbürste).

HINWEIS: ENA® WHITE 2.0 darf nur abgegeben werden, wenn der/die Patient/in vorher in der Zahnarztpraxis untersucht wurde, mögliche Allergien ausgeschlossen wurden und keine Kontraindikationen vorliegen. Daraufhin erfolgt eine professionelle Zahnreinigung (wir empfehlen Ena Care).

Die erste Applikation erfolgt in der Zahnarztpraxis, danach wird ENA® WHITE 2.0 dem Patienten/In für die Weiterbehandlung mitgegeben.

ms-dental[®]

MS Dental AG
Dentalprodukte · Produits dentaires
Juraweg 5 · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78
info@msdental.ch · www.msdental.ch