

Maximieren Sie Ihren Erfolg



Quick Start Guide

Wahl und Einsatz des Isolite Mundstücks

isolite[®]SYSTEMS

Better Isolation = Better Dentistry[®]

1

Bereiten Sie sich auf den Erfolg vor

**Danke, dass Sie das Isolite System gekauft haben.
Wir freuen uns darauf, Sie beim Erfolg zu unterstützen.**

- Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um sich mit der Grössenwahl und dem Platzieren des Mundstücks vertraut zu machen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt installiert ist.
- Üben Sie die Grössenwahl und das Platzieren des Mundstücks an sich selbst und mit Ihrem Team.
- Wählen Sie als ersten Patienten jemanden, der „pflegeleicht“ und offen für Neues ist.
- Videos zur Wahl der passenden Grösse und zum Platzieren finden Sie unter **www.ms dental.ch/isolite**

2

Einsatz und Verwendung für das Isolite System

Dank der Fähigkeit unsers Systems, den Mund trocken zu halten, Hals und Luftwege Ihrer Patienten zu schützen und Zunge und Speichel unter Kontrolle zu haben, eignet es sich perfekt für:

- Zementieren und Bonding
- Restaurationen
- Versiegler
- Kinderzahnmedizin
- CAD/CAM
- Laser
- Extraktionen
- Implantate
- Scaling und Wurzelglätten

3

Grössenbestimmung des Mundstücks

Messen Sie den Abstand zwischen den Frontzähnen Ihres Patienten, um die Grösse des Mundstücks zu bestimmen.

Instruieren Sie den Patienten, den Mund so weit zu öffnen, wie es für ihn noch angenehm ist.

Verwenden Sie Ihre Finger zum Messen des Abstandes, eine Schieblehre (Caliper) oder ein anderes Messinstrument.



Ein Finger < 30 mm
Pediatric oder Extra Small

Zwei Finger 30 mm
Small

Drei Finger 30 – 45 mm
Medium oder Medium DV

Vier Finger > 45 mm
Large

Wenn der Patient zwischen zwei Grössen ist, verwenden Sie das kleinere Mundstück.

4

Wahl des Mundstücks



Jedes Mundstück ist farbcodiert für eine intuitive, schnellere Entnahme und Aufbewahrung und individuell in Kunststoffbeuteln verpackt, um die Sauberkeit zu garantieren.



Öffnen Sie den Beutel entlang der gestrichelten Linie vor dem Patienten, damit er sieht, dass das Mundstück noch nie verwendet wurde.

5

Befestigung des Mundstücks



Befeuchten Sie die Innenfläche der Mundstücköffnung mit Mundstück-Gleitmittel oder Wasser.



Schieben Sie das Mundstück auf den Adapter, bis die zwei Verriegelungsknöpfe im Mundstück einschnappen.

6

Vorbereitung des Mundstücks zum Einsetzen



Rückseite des Mundstücks mit Wasser einsprühen.

Lippen des Patienten entweder mit Mundstück-Gleitmittel oder Lippenpommade befeuchten.



Das Befeuchten des Mundstücks und der Lippen erleichtern das Einführen des Mundstücks in den Mund des Patienten.

7

Einsetzen des Mundstücks



Halten Sie den Kontrollkopf zwischen Zeigefinger und Daumen.


Verwenden Sie zum Platzieren des Mundstücks beide Hände



Den Wangenschild auf den Zungenretraktor falten.

8


Einsetzen des Mundstücks (Fortsetzung)

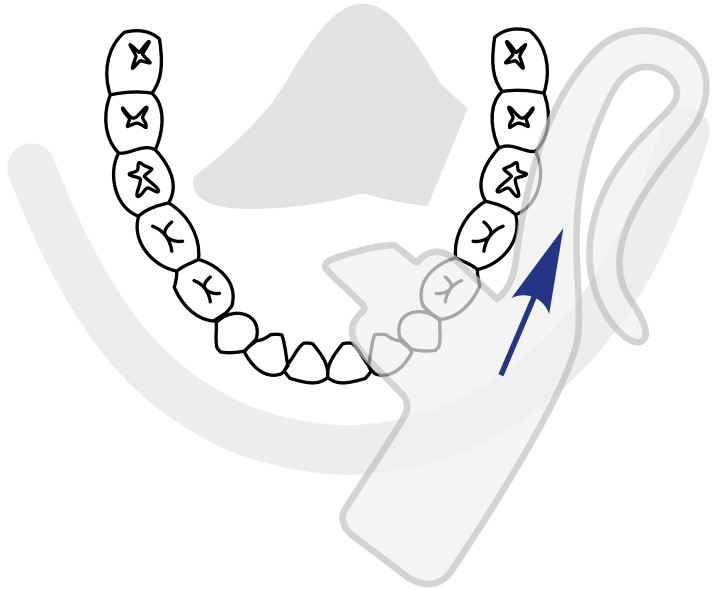

Das gefaltete Mundstück sanft in die Wange der zu behandelnden Mundseite schieben, bukkal zum Kiefer.

9

Einsetzen des Mundstücks (Fortsetzung)

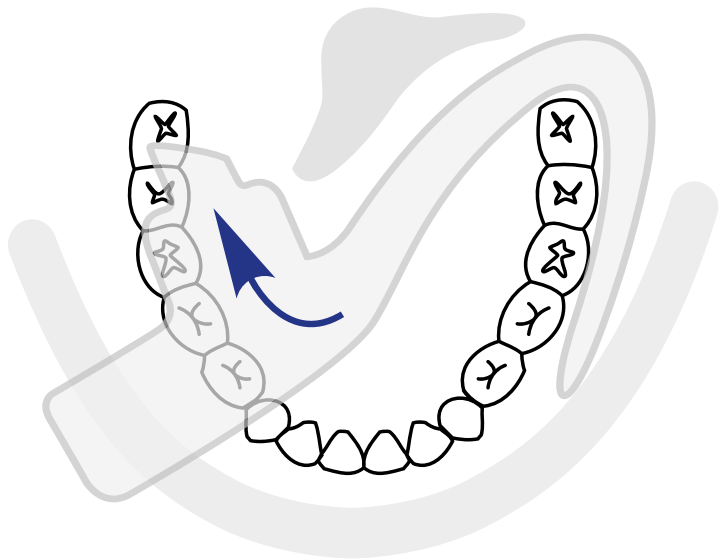

Bissblock durch den Mund auf die Okklusalfäche der den zu behandelnden Zähnen gegenüberliegenden ziehen, distal zum mandibulären Eckzahn.

Patienten sanft zubeissen lassen

10

Einsetzen des Mundstücks (Fortsetzung)



Wangenschild in der Wange platzieren und den Isthmus auf den retro-molaren Bereich schieben.



Den Bissblock distal verschieben, um ein grösseres vertikales Arbeitsfeld zu erhalten.

11

Tipps, um den Patienten zu überzeugen

- Zeigen Sie dem Patienten das Mundstück und erklären Sie ihm, wie dies den Zahnarztbesuch verbessern und dadurch angenehmer und schneller machen wird und verhindert, dass Flüssigkeit und Debris in den Hals geraten.
- Beginnen Sie, indem Sie das Mundstück zuerst in die Wange des Patienten einführen. Platzieren Sie den Bissblock NICHT als erstes.
- Wenn das Mundstück an Ort und Stelle ist, dem Patienten Zeit geben, sich daran zu gewöhnen.
- Versichern Sie Ihrem Patienten, dass bereits Millionen von Patienten mit Isolite sehr zufrieden waren.
- Wenn Sie mit dem platzieren Mundstück arbeiten, müssen Sie ev. die Handhabung Ihrer Dentalinstrumente ein wenig anpassen, um einen maximalen Erfolg zu erzielen.

12

Problemlösungen

Das Mundstück passt nicht auf den Kontrollkopf.

Versichern Sie sich, dass die Absaugereinheit auf der Kontrollbasis installiert ist.

Das Mundstück rutscht leicht vom dem Kontrollkopf.

Stellen Sie sicher, dass die zwei Verriegelungsknöpfe im Mundstück eingeschnappt sind.

Überprüfen Sie, ob sich nicht zu viel Gleitmittel in der Mundstücköffnung befinden – entfernen Sie überschüssiges Gleitmittel und setzen Sie es wieder auf den Kontrollkopf.

Einige meiner Patienten scheinen sich mit dem Mundstück nicht anfreunden zu können.

Stellen Sie sicher, dass der Isthmus – die schmale Stelle des Mundstücks – auf der bukkalen Seite des Kiefers in den bukkalen Hohlraum eingeführt wird und NICHT in den Hals des Patienten hinunter.

Versichern Sie sich, dass der Wangenschild als LETZTES in die Wange des Patienten geschoben wird.

**Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren
Sie unseren Kundendienst unter 032 387 38 68.**

ms-dental ^{SA}

MS Dental AG · Dentalprodukte · Produits dentaires · Juraweg 5 · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78 · info@msdental.ch · www.msdental.ch