

Zementieren einer Zirkonoxid Rekonstruktion



1. Die Innenfläche reinigen und lufttrocknen.



2. Z-Prime Plus mit dem Pinsel auftragen, danach 3–5 Sekunden lufttrocknen.



3. Zement einbringen (z.B. BisCem)

Hinweis

Die Zahnoberfläche sollte sauber und trocken sein, Bonding ist nicht erforderlich bei der Verwendung von BisCem.

Bestellinformationen

Z-Prime Plus

Primer für Zirkonoxid und Metalle

BIB-6002P 1 Flasche à 2 ml

BIB-6001P 1 Flasche à 4 ml

Cavity Cleanser

2% Chlorhexidindiglukonat

BIB-2807A 1 Flasche à 7 ml

BisCem Dual Syringue

Selbstadhäsives, dualhärtendes

Befestigungskomposit

BID-45011P Translucent, 8 g

BID-45012P Opaque, 8 g



ms·dental⁺

MS Dental AG

Dentalprodukte · Produits dentaires

Juraweg 5 · CH-3292 Buswil

T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78

info@msdental.ch · www.msdental.ch