

D/Sense[®] Crystal[™]



centrix

Wichtige Hinweise

Damit D/Sense Crystal seine Wirkung richtig entfalten kann, muss die Gebrauchsanleitung genau befolgt werden. Wenn man den Salzen in der Lösung nicht genügend Zeit zum Auskristallisieren gibt, kann sich die Sensibilität erhöhen, anstatt verringern.

D/Sense Crystal ist leicht sauer. Auf der Zahnoberfläche wirkt es zunächst wie ein gewöhnliches Ätzmittel, wobei das Kalzium aus dem Zahn herausgelöst wird und die Tubuli geöffnet werden. Offene Tubuli können zu Hypersensibilität führen. Wenn das D/Sense zu früh weggespült wird, verbleibt lediglich eine angeätzte Zahnoberfläche und damit ein Zahn, der empfindlicher ist als zuvor.

Bei korrekter Anwendung sollte das Dentin mit D/Sense Crystal gesättigt werden und dann mit einem schwachen Luftstrom für etwa 30 Sekunden getrocknet werden. Alternativ kann man die Oberfläche für 2 Minuten ungehindert trocknen lassen. Auf keinen Fall spülen!

Um die Anwendung etwas angenehmer zu gestalten, kann man die Spritze mit D/Sense Crystal unter warmem Wasser aufwärmen: für empfindliche Zähne ist bereits Zimmertemperatur schmerzhaft.

ms·dental⁺

MS Dental AG
Dentalprodukte · Produits dentaires
Juraweg 5 · CH-3292 Busswil
T +41 32 387 38 68 · F +41 32 387 38 78
info@msdental.ch · www.msdental.ch