

# Schleifen Sie Ihre Instrumente immer noch täglich?



## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

### **Was unterscheidet die neuen Küretten XP von den üblichen Küretten aus rostfreiem Stahl oder karbonisiertem Stahl?**

Die XP Küretten werden mit einem patentierten Verfahren behandelt, das den rostfreien Stahl härtet und danach mit einer diamantähnlichen Schicht überzieht. Dies ergibt eine Schneidekante, die monatelang ohne Schleifen auskommt. Der Scale-Test zeigt, dass die XP Technologie 10 x mehr Einsätze verträgt bei nur einem Zehntel der Abnutzung.

### **Warum sind XP Küretten dünner als konventionelle Küretten?**

Zahlreiche Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen haben für ein besseres subgingivales Scalen dünnere Instrumente gewünscht. Mit der neuen XP Technologie, die den bereits superscharfen Kanten eine so lange Lebensdauer gibt, war es nicht mehr nötig, die Instrumente dicker zu gestalten, um den Materialverlust beim Aufschleifen zu kompensieren.

### **Wie werden die neuen Küretten sterilisiert und gepflegt?**

Die XP Küretten können wie alle Küretten aus rostfreiem Stahl gereinigt und sterilisiert werden.

### **Muss man beim Gebrauch der XP Küretten besonders aufpassen, um die maximale Lebensdauer zu erhalten?**

Ja, die XP Küretten sind für das feine subgingivale Scaling und Wurzelglätten entwickelt worden. Man sollte es vermeiden, sie über Kronenränder und Füllungsüberhänge gleiten zu lassen. Speziell hartnäckiger Zahnstein sollte mit leichtem Druck abgetragen werden.

### **Muss man während dem Reinigen und Sterilisieren speziell vorsichtig sein?**

Wir empfehlen die Verwendung von American Eagle «Instrument Cleaner», zusammen mit einer guten Instrumentenkassette, für alle Reinigungs- und Sterilisationsverfahren. Achten Sie darauf, dass sich die Instrumentenspitzen während der Reinigung und Sterilisation nicht berühren.

### **Warum scheinen die Küretten schärfer als andere?**

Sie sind es! Die XP Küretten haben eine sehr feine und scharfe, glatte Kante, die für ein effizienteres Wurzelglätten gestaltet wurde.

### **Muss ich meine Arbeitstechnik ändern?**

Nein, Sie werden bemerken, dass Sie mit den XP Instrumenten nur leichten Druck anwenden sollten. Sie werden weniger Kraft benötigen und weniger Druck.

### **Wird mein Tastsinn mit der XP Kürette wirklich besser?**

Ja, weil die Schneidekante so scharf und dauerhaft ist, werden Sie merken, dass Sie das Instrument beim Scaling und Wurzelglätten nur mit leichtem Druck einsetzen müssen.

### **Kann ich mit den XP Küretten wirklich Geld sparen, weil sie länger halten?**

Ja, Sie werden bemerken, dass die XP Küretten vier- bis zehnmal länger halten als konventionelle Küretten, je nachdem wie Sie sie behandeln.

### **Kann ich die XP Küretten aufschleifen?**

Wegen den dünneren Klingen empfehlen wir das Aufschleifen der XP Küretten nicht. Wenn sie stumpf werden, ersetzen Sie sie einfach mit einer neuen.

### **Wie kann ich bei der Verwendung von XP Küretten Geld sparen?**

Als erstes werden Sie herausfinden, dass Sie Geld sparen, weil Sie Ihre Küretten überhaupt nicht aufschleifen müssen. Sobald die Kante abgenutzt ist, kaufen Sie einfach eine neue Kürette. Die Zeit und der Aufwand, den Sie zum Aufschleifen brauchen, können Sie dazu verwenden, mehr Patienten zu behandeln oder andere berufliche Tätigkeiten zu erledigen. Zweitens sollten die XP Küretten länger halten als konventionelle Küretten, wenn sie entsprechend verwendet und behandelt werden.

### **Kann die XP Kürette meine Karriere verlängern, indem sie die Gefahr eines Karpal-Tunnel-Syndroms vermindert?**

Die Hersteller fangen an zu erkennen, dass ein leichterer Griff mit größerem Durchmesser viele Vorteile hat. Die American Eagle XP Kürette hat einen grösseren Griff, ist leichter zu halten und benötigt weniger Druck beim Arbeiten. Die kombinierten Vorteile sollten die Risiken von Verletzungen, die auf repetitive Bewegungen basieren, reduzieren.