

# Anweisungen für die Instrumentenpflege




## 1 Richtiger Gebrauch der Instrumente

- XP Instrumente **nicht** für die Bearbeitung der Ränder benutzen
- XP Instrumente **nicht** für die Bearbeitung der Füllungsüberschüsse benutzen
- XP Instrumente **nicht** für die Amalgamverarbeitung verwenden
- XP Instrumente **nicht** für die Kompositbearbeitung verwenden



## 2 Richtige Pflege

- XP Spitzen sollen sich während der Reinigung oder Aufbewahrung **nicht** berühren
- XP Instrumente **nach dem Säubern** von Schmutz und Resten sterilisieren
- **Benutzen** Sie die Kassetten zur Reinigung und Aufbewahrung der XP Instrumente

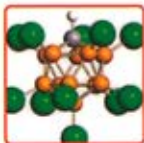

## 3 Richtige Reinigungslösungen

- Verwenden Sie **keine** chloridhaltigen Lösungen
- Verwenden Sie **keine** salzhaltigen Reiniger
- Verwenden Sie **pH-neutrale** Lösungen



## 4 Richtiges Trocknen

- XP Instrumente **immer** sorgfältig trocknen, bevor sie aufbewahrt werden