

# FluoroDose®

5% Sodium Fluoride Varnish with Xylitol

## Une méthode de fluoruration différente !

Utilisation hygiénique, précise et économique.  
Un vernis de qualité pour une application aisée.



DENTAL ADVISOR TOP AWARD: FLUORIDE VARNISH



## Centrix rend la fluoruration plus sûre et le nettoyage plus simple.

FluoroDose est un vernis au fluorure de sodium à 5 %, unidose, conditionné dans des Lollipack®, renfermant la dose maximale de fluorure autorisée et homologuée par la FDA (Etats-Unis) dans le traitement de la sensibilité dentinaire. Chaque unité contient une seule dose (0,3 ml) de FluoroDose, plus un applicateur Benda® permettant de mélanger le vernis avant l'application, garantissant ainsi une dose constante de fluorure à chaque application. Décollez la pellicule protectrice, tremper le pinceau, mélangez et appliquez.

L'ADA estime que le vernis au fluor fait partie d'un programme de prévention des caries sans danger et efficace comprenant : diagnostic de caries, évaluation des risques et soins dentaires réguliers<sup>1</sup>.



Saveurs délicieuses !  
Caramel, Bubble Gum, Menthe,  
Cerise, Melon

## Propriétés de FluoroDose

- Application et nettoyage plus faciles grâce à l'unidose pratique
- L'application au pinceau est plus facile et plus sûre à utiliser que les gels et les solutions de rinçage
- Sèche en quelques secondes au contact de la salive
- Reste sur la dent pendant 6 à 8 heures pour une absorption optimale du fluor
- Goûts agréables en 5 saveurs : Caramel, Cerise, Menthe, Melon, Bubble Gum
- Fluorure de sodium à 5 % (NaF) ou 22.600 ppm de fluorure
- Le meilleur rapport qualité/prix du marché



1. Sur [www.ada.org](http://www.ada.org) (association des dentistes américains), vous trouverez des études diverses sur l'utilisation de vernis de fluorure.

## Mode d'emploi

1. Nettoyer les dents et sécher les endroits à traiter.
2. Retirer la pellicule protectrice pour libérer le pinceau applicateur et la coupelle de vernis.
3. Saisir le pinceau et remuer le vernis dans la coupelle.
4. Appliquer une fine couche de vernis sur la surface à traiter.
5. Laisser sécher le vernis pendant env. 10 secondes et laisser ensuite le patient fermer la bouche.
6. Eliminer l'emballage et le pinceau après l'utilisation.
7. Le patient peut quitter le cabinet immédiatement après le traitement. Il faut cependant lui communiquer de ne consommer que des boissons froides pendant les deux heures qui suivent le traitement et de ne pas se brosser les dents pendant les 4 à 6 heures qui suivent celui-ci.



**À l'état sec, le vernis superflu peut sembler comme une tache et peut glisser de la surface des dents. L'efficacité du produit n'est cependant pas atteinte puisqu'il se trouve toujours une couche intacte de vernis sur la dent.**

## Indications

- Traitement de dents dont les collets sont sensibles au chaud, au froid et au sucre.
- Comblement des tubules dentinaires et prévention de la détérioration des dents chez les personnes âgées qui ont des difficultés lors du nettoyage des dents.
- Chez les patients à risque élevé de caries, le vernis devrait être réappliqué tous les trois mois, lors d'un petit risque, réappliquez tous les six mois.

## Contre-indications

Les patients à petit risque de caries qui consomment de l'eau fluorée à l'optimum, ou des patients régulièrement traités au fluorure par leur dentiste.

## Informations concernant le risque d'allergie

FluoroDose ne contient aucun produit en lait, œuf, gluten, soja, cacahuètes, noix, dérivés de noix, poissons/crustacés et grains. FluoroDose contient de la colophane et de la cire d'abeille.

**CEN700001 FluoroDose assort.**  
5 flavor à 40 pces.

**CEN360110 FluoroDose Cherry**  
120 pces par emb.

**CEN360086 FluoroDose Mint**  
120 pces par emb.

**CEN360137 FluoroDose Caramel**  
120 pces par emb.

**CEN360087 FluoroDose Gum**  
120 pces par emb.

**CEN360107 FluoroDose Melon**  
120 pces par emb.

Prix sans TVA et frais de port. Changements de prix réservés.

Commandez tout simplement dans notre shop [www.ms dental.ch](http://www.ms dental.ch) avec un **rabais online de 5 %** ou appelez-nous au **032 387 38 68**.