

FluoroDose®

5 % Natriumfluoridlack mit Xylitol

Die geschmackvolle Art der Fluoridierung!

Zum wiederholten Mal der beste Fluoridlack!
Fluoridlacke sind heute die erste Wahl beim Auftragen von Fluorid bei Kindern und Erwachsenen.



DENTAL ADVISOR TOP AWARD: FLUORIDE VARNISH

4.4

Dental PRODUCT SHOPPER
BEST PRODUCT



Centrix macht die Fluoridierung sicherer und das Reinigen einfacher

FluoroDose enthält 5 % Natriumfluorid, die maximal erlaubte Dosis in der praktischen LolliPack®-Einmalpackung. FluoroDose ist von der FDA für die Behandlung von Dentinhypersensibilität zugelassen. Jede Einheit enthält eine Einzeldosis (0,3 ml) FluoroDose und einen Benda®-Pinsele Applikator, mit dem Sie den Lack vor dem Auftragen mischen können, was eine gleichbleibende Fluoridkonzentration bei jeder Anwendung garantiert. Einfach die Schutzhülle abziehen, den Pinsel eintauchen, mischen und applizieren.

Die US-amerikanische zahnärztliche Vereinigung ADA sieht Fluoridlack als sicheren und wirksamen Bestandteil eines Programms zur Kariesprävention an, welches Kariesdiagnostik, Risikobeurteilung und regelmäßige Zahnpflege umfasst.¹

Eigenschaften von FluoroDose

- Leichteres Auftragen und Reinigen dank praktischer Einheitsdosierung
- Einmaliges Auftragen mit dem Pinsel ist einfacher und sicherer als Gele und Mundspülungen
- Bei Kontakt mit Speichel in Sekundenschnelle trocken
- 6 bis 8 Stunden am Zahn für optimale Fluoridaufnahme
- In 5 Geschmacksrichtungen erhältlich: Karamell, Kaugummi, Minze, Kirsche und Melone
- 5 % Natriumfluorid (NaF) oder 22.600 ppm Fluorid
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt



In diesen leckeren Geschmacksrichtungen erhältlich! Karamell, Kaugummi, Minze, Kirsche und Melone



centrix®
Making Dentistry Easier.™

1. Auf der Website der US-amerikanischen zahnärztlichen Vereinigung ADA finden Sie verschiedene Studien über die Anwendung von Fluoridlacken; besuchen Sie www.ada.org

Verwendungshinweise

1. Zähne reinigen und überschüssige Flüssigkeit vom zu behandelnden Bereich entfernen.
2. Die Folienabdeckung langsam abziehen, um den Pinselapplikator und die Lackschale freizulegen.
3. Den Pinselapplikator entfernen und das Material in der Schale verrühren.
4. Eine dünne Schicht Lack auf den Behandlungsbereich auftragen.
5. Den Lack etwa 10 Sekunden lang trocknen lassen und den Patienten dann bitten, den Mund zu schließen.
6. Die Verpackung und den Applikator nach der Verwendung entsorgen.
7. Der Patient kann sofort nach der Behandlung die Praxis verlassen. Dem Patienten muss mitgeteilt werden, dass er für zwei Stunden nach der Behandlung nur weiche Speisen und kalte Getränke zu sich nehmen und mindestens 4 bis 6 Stunden nicht die Zähne putzen darf.



Im trockenen Zustand kann der überschüssige Lack «fleckig» wirken und von der Zahnoberfläche gleiten. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt, da sich noch eine unversehrte Lackschicht auf dem Zahn befindet.

Indikationen

- Dient zur Behandlung von Zähnen, die auf Heißes, Kaltes und Süßes am Zahnhals empfindlich reagieren.
- Beugt durch Verschließen der Dentintubuli dem Zahnverfall bei älteren Patienten vor, die Schwierigkeiten beim Reinigen ihrer Zähne haben.
- Die Lackierung sollte bei Patienten mit hohem Kariesrisiko alle drei Monate und bei Patienten mit geringem Risiko alle sechs Monate aufgefrischt werden.



Kontraindikationen

Patienten mit geringem Kariesrisiko, die optimal fluoridiertes Wasser trinken, oder Patienten, die vom Zahnarzt regelmäßig mit Fluorid behandelt werden. Informationen zum Allergenrisiko

Informationen zum Allergenrisiko

FluoroDose enthält keine Produkte aus Milch, Eiern, Gluten, Soja, Erdnüssen, Baumüssen, Baumussderivaten, Fischen/Krustentieren und Samen. FluoroDose enthält Kolophonium und Bienenwachs.

CEN700001	FluoroDose Assort 5 Flavor à 40 Stück	CHF 93.90
CEN360110	FluoroDose Cherry 120 Stück pro Packung	CHF 225.40
CEN360086	FluoroDose Mint 120 Stück pro Packung	CHF 225.40
CEN360137	FluoroDose Caramel 120 Stück pro Packung	CHF 225.40
CEN360087	FluoroDose Gum 120 Stück pro Packung	CHF 225.40
CEN360107	FluoroDose Melon 120 Stück pro Packung	CHF 225.40

Preise exkl. MWST und Versandkosten.
Preisänderungen vorbehalten.

Bestellen Sie ganz einfach über unseren Shop www.ms-dental.ch mit einem **Online-Rabatt von 5%** oder rufen Sie uns unter der **Telefonnummer 032 387 38 68** an.